

導電性シリコンフェイスマスクの使用法

①クレイジングで落としてください。



②パックシートを貼ってください。



※シートにシワができないように、
しっかり伸ばしてください

③電極コードを付けたフェイスマスクを装着してください。



配線A（この場合、黒のコード）を「おでこ」と「あご」へ、
配線B（この場合、グレーのコード）を左右の「ほほ」に付けてください。

強さは一般的に6～10です。

ピリピリしない程度に調整してください。

（注）入れ歯・差し歯の方には、6以下でもピリピリする場合があります。
その場合はピリピリしない強さに調整してください。